

## Versandbedingungen und Artikulatorliste

### Versandbedingungen

Der Versand an Astra Tech mit der Versandbox (Atlantis™ CaseSafe) gewährleistet einen sicheren Transport und sorgt für die effiziente und korrekte Bearbeitung Ihrer Bestellung. Ihrer Bestellung müssen folgenden Unterlagen beigefügt werden.

#### Fälle mit Schalllücken bei 1-3 benachbarten Einheiten:

Meistermodell mit Modellimplantaten, einartikuliert  
Bissregistrat (empfohlen)  
Abnehmbare weichbleibende Zahnfleischmaske

#### Fälle mit Schalllücken bei 4 oder mehr benachbarten Einheiten:

Meistermodell mit Modellimplantaten, einartikuliert  
Bissregistrat (empfohlen)  
Abnehmbare weichbleibende Zahnfleischmaske  
Abnehmbares Wachs-up oder Set-up

#### Fälle mit zahnlosem Kiefer:

Meistermodell mit Modellimplantaten, einartikuliert  
Bisschablone oder Bissregistrat (empfohlen)  
Abnehmbare weichbleibende Zahnfleischmaske  
Abnehmbares Set-up

#### Wichtig:

Die Arbeitsunterlagen müssen vor dem Versenden desinfiziert werden!



Bestellen Sie bitte bei Bedarf  
Atlantis™ CaseSafe (Versandboxen)  
kostenlos unter 06431 9869 76.

### Artikulatoren

Eine Grundvoraussetzung für die Herstellung von Zahnersatz ist die intraorale Bissregistrierung. Nur eine richtige Bissregistrierung ermöglicht das bestmögliche Ergebnis für den Patienten.

Alle Fälle müssen vor dem Versand an Astra Tech einartikuliert werden. Stellen Sie bitte die korrekte Kieferrelation sicher. Für Einzelzahnversorgungen und weniger komplizierte Fälle kann eine Okkludator benutzt werden.

#### Ceramco Vertex Kunststoff Steckokkludatoren



#### Ray Foster Apex oder ähnliche

Müssen in die Versandbox  
(CaseSafe™) passen



Alle Patientenfälle sollten einartikuliert sein. Für umfangreiche und komplizierte Arbeiten sind folgende Artikulatoren möglich.

**Wichtig:**

Ist der von Ihnen verwendete Artikulator gelistet, brauchen Sie lediglich die Modelle mit Sockelplatten zu Astra Tech senden und nicht den ganzen Artikulator.

**Artex**  
mit Splitcast



**Denar**  
mit Splitcast oder  
Schraub-Sockelplatten



**Dentatus**  
mit Schraub-Sockelplatten



**Hanau**  
mit Schraub-Sockelplatten



**Kavo Protar 3**  
mit Splitcast



**Panadent**  
mit Splitcast



**Sam 3**  
mit Splitcast oder  
Schraub-Sockelplatten



**Stratus 200**  
mit Splitcast oder  
Schraub-Sockelplatten



**Whip Mix**  
mit Schraub-Sockelplatten

